


# ENFit® Procedimientos de limpieza

## Tubos de alimentación con conectores ENFit machos

(por ej., tubos nasogástricos, transpilóricos, orogástricos, de gastrostomía endoscópica percutánea y otros dispositivos ENFit)

**Consejos para mantener limpios los puertos de los tubos de alimentación ENFit. ¡Inspeccione antes de conectar!**

- **Juegos de alimentación de cebado** - Detenga el cebado antes de que el líquido alcance el final del tubo.
- **Preparación de jeringuilla de ENFit** - Limpie la medicación y la nutrición de la punta y las roscas externas; mantenga los líquidos fuera del espacio muerto antes de conectar al tubo de alimentación.

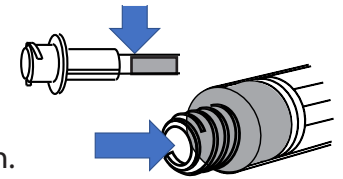

Para obtener los mejores resultados, siga estas instrucciones para limpiar los tubos al menos una vez al día o siempre que haya material visible.

Suministros y términos para la limpieza de tubos		1	2						
Taza de agua estéril o limpia del grifo	Jeringuilla	Gasa	Cepillo* o herramienta específica de limpieza ENFit	Foso	Tapa	tubo de alimentación ENFit	Lávese las manos con jabón y agua o use guantes. Enjuague el cepillo con agua del grifo.	Llene la jeringuilla con agua.	
<b>Nota:</b> Use un cepillo desechable o siga las instrucciones del fabricante si utiliza el cepillo de limpieza específico de ENFit.									
		Tape el agujero central del puerto del tubo de alimentación con las cerdas del cepillo. Enjuague fuertemente el foso con agua.		Gire el cepillo en el fondo del foso.		Enjuague la tapa con agua limpia del grifo.		Inserte las cerdas en la tapa del tubo de alimentación y gire el cepillo en la tapa para limpiarla.	
		Limpie el puerto y la tapa del tubo de alimentación con gasa. Limpie los suministros y déjelos que sequen al aire.							

**Repita los pasos 3 a 6 hasta que la tapa y el tubo estén completamente limpios.**

\* En algunas jurisdicciones, los cepillos de dientes manuales están regulados como dispositivos médicos diseñados para quitar los escombros de los dientes. Consulte a su proveedor de atención médica con licencia o a su Gerente de Riesgos en relación con el uso recomendado para la limpieza de los puertos de los tubos de alimentación. Deseche los dispositivos de un solo uso según las instrucciones. Procedimientos de limpieza cortesía de Children's Mercy Kansas City.

© GEDSA 2018 ENFit es una marca federalmente registrada de GEDSA.

**GEDSA**