


ENFit® Reinigingsprocedures

Verlengset voedingssondes met laag profiel


Tips om de poorten van de ENFit voedingssonde schoon te houden. Inspecteer voordat u verbindt!

- **Voedingssonde-sets aanzuigen** - Stop aanzuigen voordat de vloeistof het einde van de sonde bereikt:
- **ENFit injectiespuit aanzuigen** - Veeg medicatie en voeding van het uiteinde/buitenste draden, houd vloeistoffen uit dode ruimte alvorens te verbinden met de voedingssonde

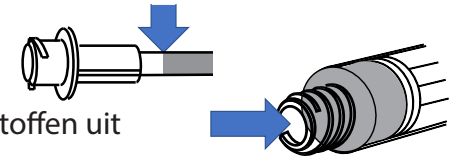


Voor de beste resultaten, volg deze instructies om de sondes te ten minste eenmaal per dag te reinigen of telkens als materiaal zichtbaar is.


Voorzieningen om sondes te reinigen & voorwaarden

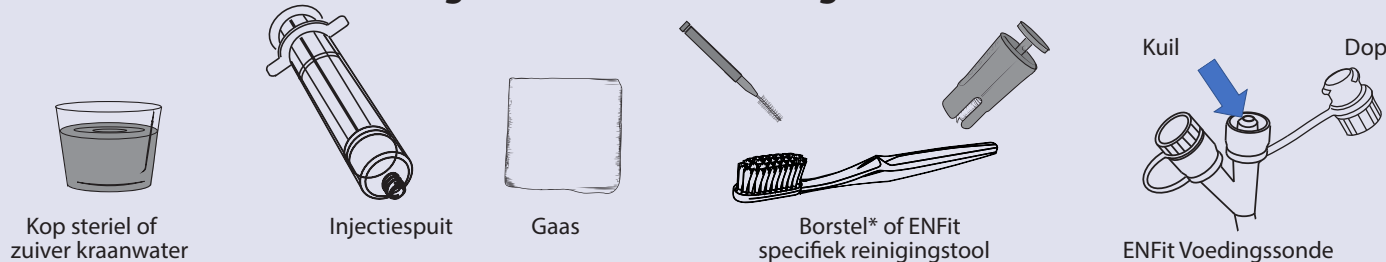


Merk op: Gebruik een wegwerpborstel of volg de instructies van de fabrikant als u een specifieke reinigingsborstel voor ENFit gebruikt.

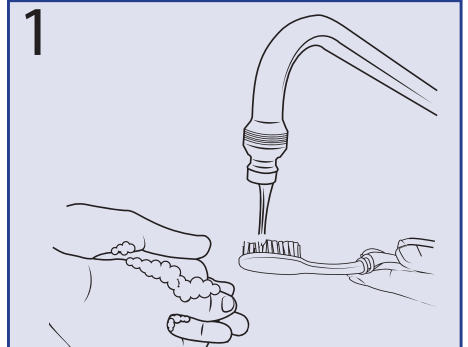


1 Was uw handen met zeep en water of gebruik handschoenen. Spoel de borstel af met kraanwater.

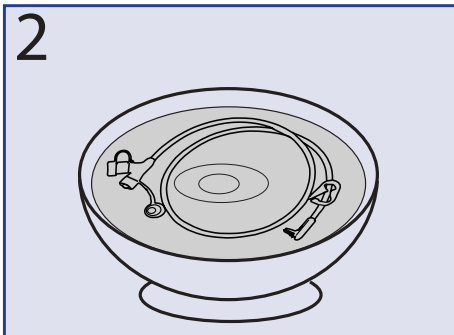


2 Koppel de verlengset los, week in zuiver water of spoel af onder de kraan gedurende ten minste één minuut.

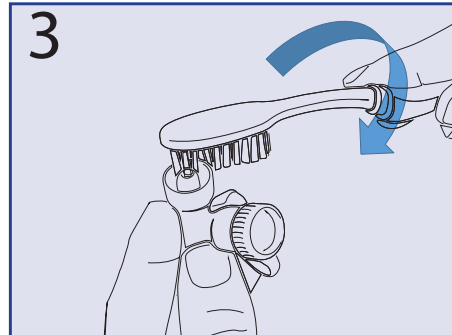

3 Maak de tandenborstel nat en rooteer in de kuil en groeven van de dop gedurende 15 seconden.

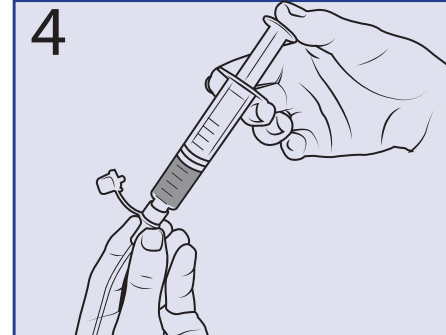

4 Vul de injectiespuit en spoel met zuiver kraanwater.

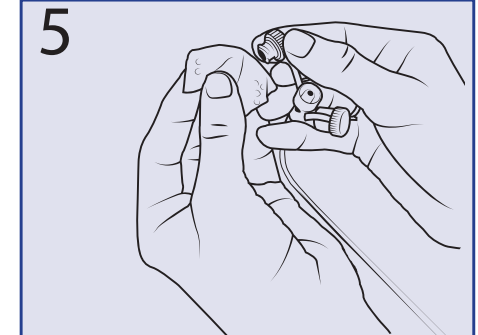

5 Veeg de poort en dop van de voedingssonde droog met gaas. Reinig de benodigdheden en laat aan de lucht drogen.

* Een handmatige tandenborstel is geregeld zoals een medisch apparaat dat bestemd is om vuilresten van de tanden te verwijderen in sommige jurisdicties. Raadpleeg uw arts of risicomanager over het aanbevolen gebruik om poorten van voedingssonden te reinigen. Verwijder medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik in overeenstemming met de instructies. Reinigingsprocedures met dank aan Children's Mercy Kansas City.
© GEDSA 2018 ENFit is een geregistreerd handelsmerk van GEDSA.