


ENFit® Procedure di pulizia

Prolunghe delle sonde di alimentazione a basso profilo


Suggerimenti per mantenere pulite le porte delle sonde di alimentazione ENFit. Ispezionare prima di collegare!

- **Pompaggio dei set di alimentazione** - Interrompere il pompaggio prima che il liquido raggiunga la fine della sonda.
- **Preparazione della siringa ENFit** - Pulire farmaco e sostanza nutritiva da punta/aghi esterni, tenere i liquidi fuori dallo spazio morto prima di collegare alla sonda di alimentazione.

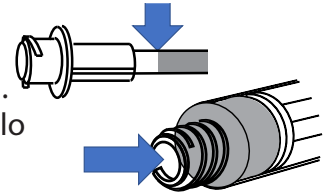


Per risultati ottimali, seguire queste istruzioni per pulire i tubi almeno una volta al giorno o ogni volta che il materiale diventa visibile.


Accessori per la pulizia delle sonde e terminologia

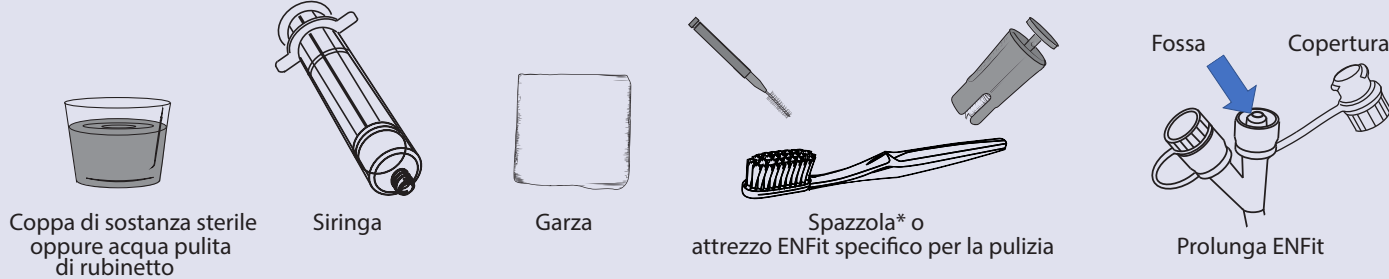


Nota: Utilizzare una spazzola usa e getta o seguire le istruzioni del fabbricante se si utilizza la spazzola ENFit specifica per la pulizia.

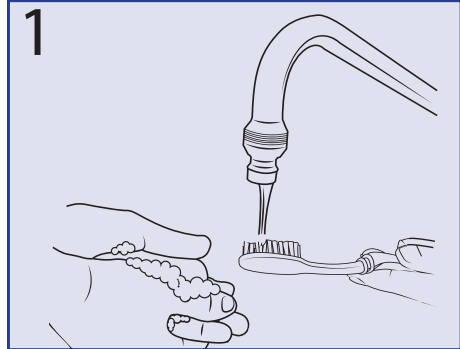


1
Lavare le mani con sapone e acqua oppure utilizzare i guanti. Sciacquare la spazzola con acqua di rubinetto.

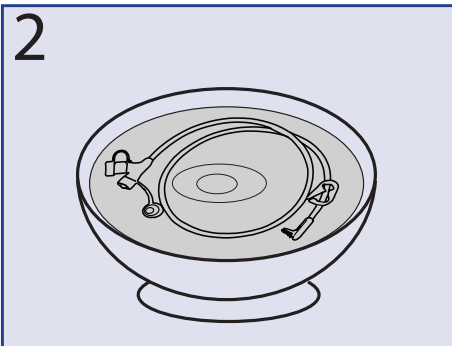


2
Scollegare la prolunga, immergere in acqua pulita o sciacquare sotto al rubinetto per almeno un minuto.

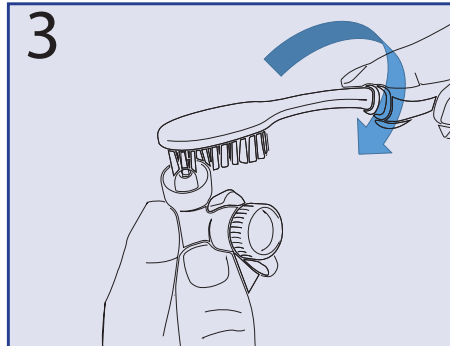

3
Bagnare lo spazzolino e ruotare nella fossa e tra le scanalature della copertura per 15 secondi.

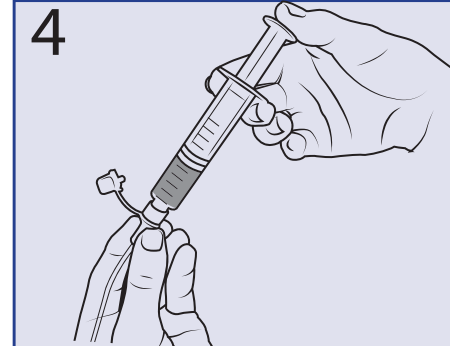

4
Riempire la siringa poi irrorare o sciacquare con acqua di rubinetto pulita.

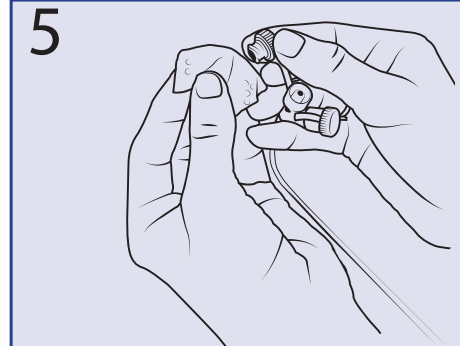

5
Asciugare la porta della sonda di alimentazione e la copertura con una garza. Pulire gli accessori e fare asciugare all'aria.