


# ENFit® Procedimentos de limpeza

## Conjuntos de extensão de tubos de alimentação de perfil baixo


**Conselhos para manter as portas do tubo de alimentação ENFit limpas. Realize a inspeção antes de ligar!**

- **Preparação dos conjuntos de alimentação** - Interrompa a preparação antes do fluido chegar à extremidade do tubo.
- **Aspiração de seringa ENFit** - Limpe a medicação e nutrição da ponta/linhas exteriores e mantenha os fluidos fora do espaço morto antes de ligar ao tubo de alimentação.

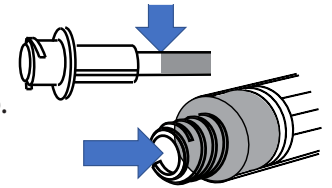


Para obtenção de melhor resultados, siga estas instruções para limpar os tubos pelo menos uma vez por dia ou sempre que existir material visível.


### Termos e acessórios para limpeza de tubos

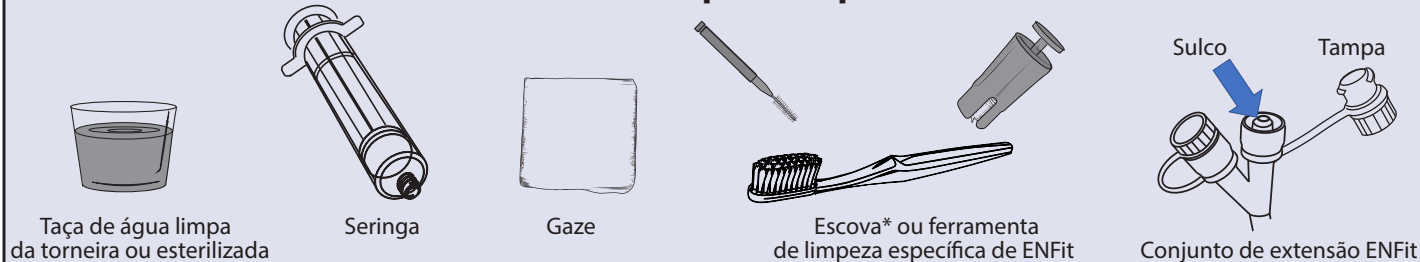


**Nota:** Utilize uma escova descartável ou siga as instruções do fabricante se estiver a utilizar uma escova de limpeza específica de ENFit.

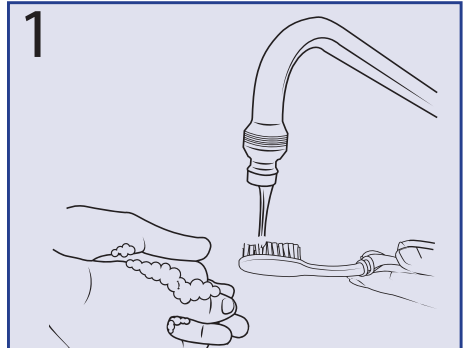


1 Lave as mãos com água e sabão ou use luvas. Enxágue a escova com água da torneira.

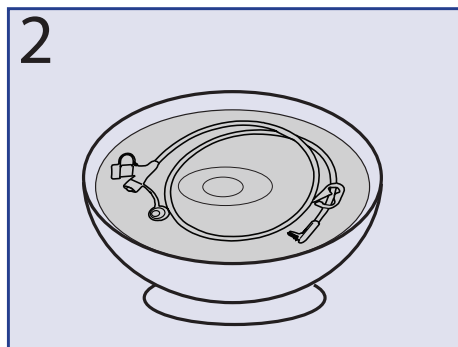


2 Desligue o conjunto de extensão, mergulhe em água limpa ou enxágue sob a torneira durante pelo menos um minuto.

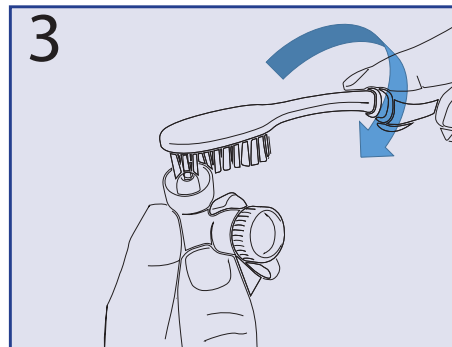

3 Molhe a escova de dentes e rode-a no fundo do sulco e nas ranhuras da tampa durante 15 segundos.

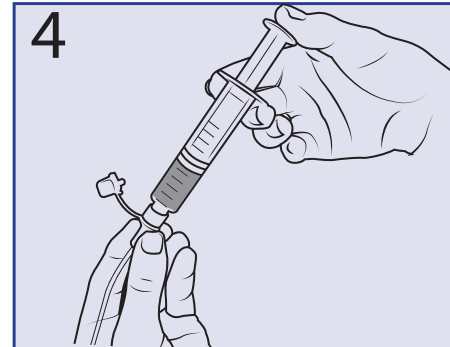

4 Encha a seringa e, em seguida, lave ou enxágue com água limpa da torneira.

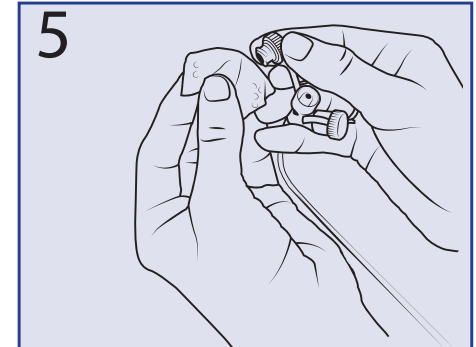

5 Seque a tampa e a porta do tubo de alimentação com gaze. Limpe os acessórios e deixe secar ao ar.

\* Uma escova de dentes manual está regulamentada como dispositivo médico para remoção de resíduos dos dentes em algumas jurisdições. Consulte o seu prestador de cuidados de saúde licenciado ou Gestor de Risco relativamente ao uso recomendado para limpeza das portas do tubo de alimentação. Elimine os dispositivos descartáveis de acordo com as instruções. Procedimentos de limpeza cortesia do Children's Mercy Hospital de Kansas City.  
© GEDSA 2018 ENFit é uma marca comercial registada da GEDSA.