

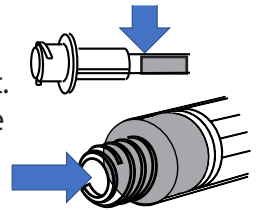
# ENFit® Reinigungsverfahren

## Zuleitungsschläuche mit männlichen ENFit-Anschlüssen


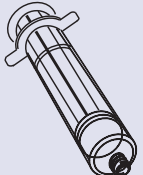



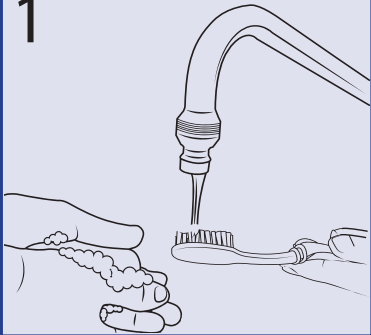
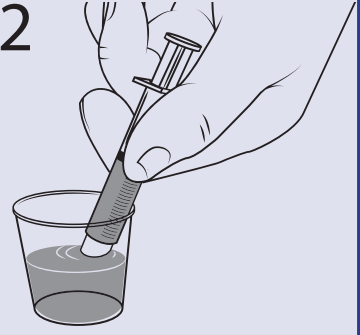
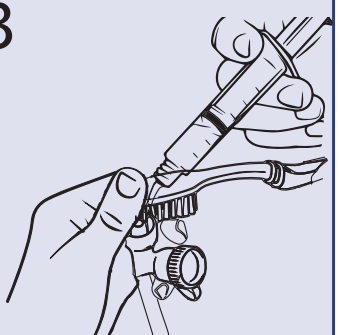
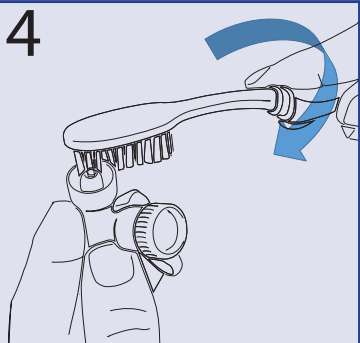
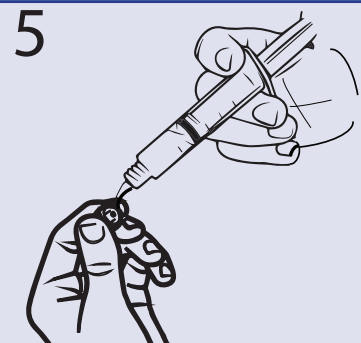
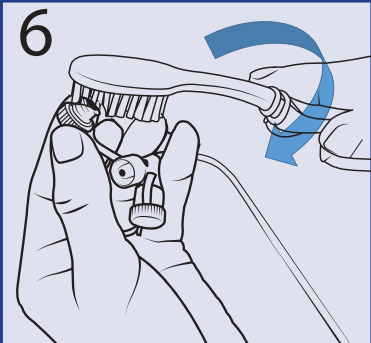
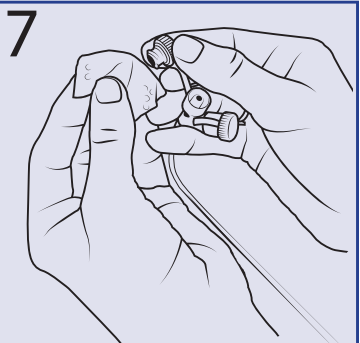
(z. B. nasogastrale, transpylorische, orogastrische, perkutane endoskopische Gastrostomieschläuche und andere ENFit-Geräte)

### Tipps, um die Anschlüsse von ENFit-Zuleitungsschläuchen sauber zu halten. Vor dem Anschließen überprüfen!

- **Vorbereitung (Priming) der Zuleitungssets** - Stoppen Sie die Vorbereitung, bevor die Flüssigkeit das Ende des Schlauchs erreicht.
- **ENFit-Spritze aufziehen** - Wischen Sie Medikamente und Nährlösung von der Spitze/vom äußeren Gewinde ab, und lassen Sie keine Flüssigkeit in den Totraum gelangen, bevor Sie sie an den Zuleitungsschlauch anschließen.



Für beste Ergebnisse befolgen Sie diese Anweisungen zur Schlauchreinigung mindestens einmal pro Tag oder bei sichtbaren Rückständen.

Schlauchreinigung - Zubehör & Bezeichnungen				
 Becher steriles sauberes Leitungswasser	 Spritze	 Gaze	 Bürste* oder spezifisches ENFit-Reinigungswerkzeug	 ENFit-Zuleitungsschlauch Ausnehmung Abdeckung
<b>Hinweis:</b> Verwenden Sie eine Einwegbürste oder befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, wenn Sie eine ENFit-spezifische Reinigungsbürste verwenden.				
<b>1</b> 	<b>2</b> 			
<b>3</b> 		<b>4</b> 		<b>5</b> 
<b>6</b> 		<b>7</b> 		
Stecken Sie die Borsten der Bürste in die mittlere Öffnung des Zuleitungsschlauchanschlusses. Spülen Sie die Ausnehmung kräftig mit Wasser.		Drehen Sie die Bürste am Boden der Ausnehmung.		Spülen Sie die Abdeckung mit sauberem Leitungswasser.
Führen Sie die Borsten in die Abdeckung des Zuleitungsschlauchs ein, und drehen Sie sie zum Reinigen die Bürste in der Abdeckung.		Wischen Sie den Anschluss und die Abdeckung des Zuleitungsschlauchs mit Gaze ab. Reinigen Sie das Zubehör und lassen Sie es an der Luft trocknen.		

### Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, bis die Abdeckung und der Schlauch vollständig sauber sind.

\* Eine manuelle Zahnbürste ist in manchen Rechtsordnungen als medizinisches Gerät reguliert, das dazu bestimmt ist, Rückstände von den Zähnen zu entfernen. Konsultieren Sie Ihren lizenzierten Gesundheitsdienstleister oder Risikomanager in Bezug auf die empfohlene Verwendung zur Reinigung von Zuleitungsschlauchanschlüssen. Entsorgen Sie Einwegprodukte wie angewiesen. Reinigungsverfahren mit freundlicher Genehmigung von Children's Mercy Kansas City.  
© GEDSA 2018 ENFit ist eine eingetragene Marke von GEDSA.