

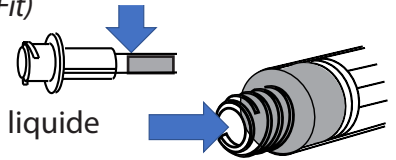
ENFit® Procédures de nettoyage

Sondes d'alimentation avec raccords mâles ENFit


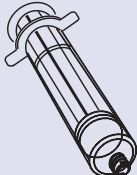


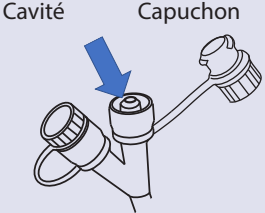
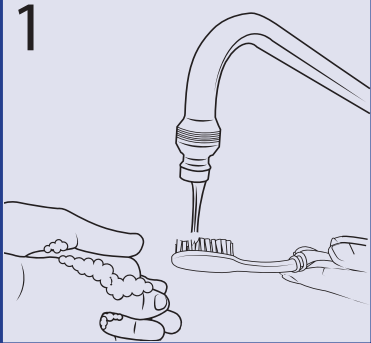
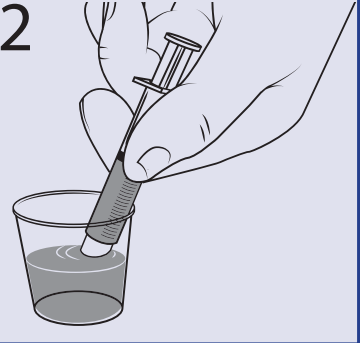
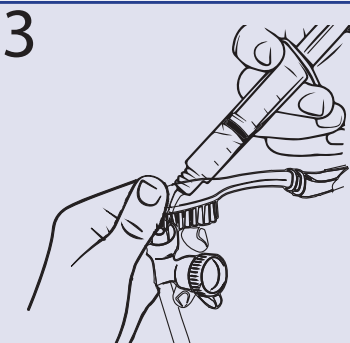
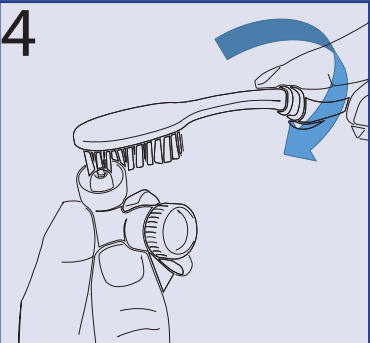
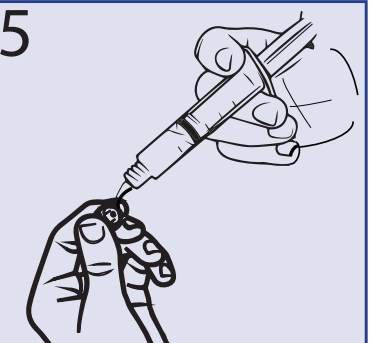
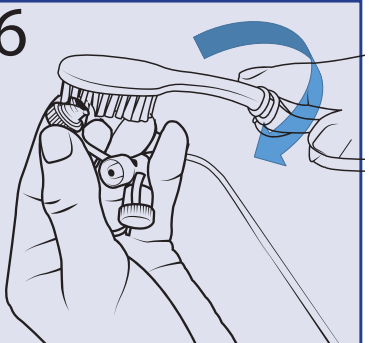
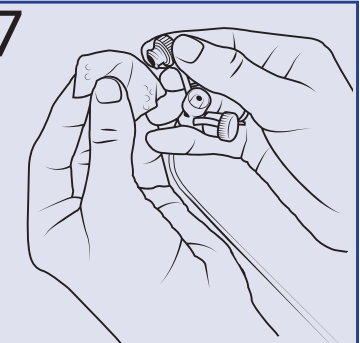
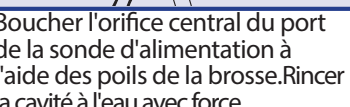
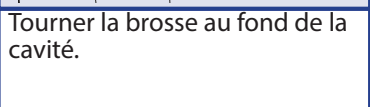
(par ex. sondes nasogastriques, transpyloriques, orogastriques, de gastrostomie percutanée endoscopique et autres dispositifs ENFit)

Conseils pour maintenir la propreté des ports de la sonde d'alimentation ENFit. Inspecter avant de connecter !

- **Amorçage des ensembles d'alimentation** - Arrêter d'amorcer avant que le liquide n'atteigne la fin de la sonde.
- **Aspiration par la seringue ENFit** - Essuyer le médicament et la nutrition sur la pointe / le filetage extérieur, tenir le liquide en dehors de l'espace mort avant de connecter la sonde d'alimentation.



Pour de meilleurs résultats, suivre ces instructions pour nettoyer les sondes au moins une fois par jour ou chaque fois que de la matière est visible.

| Fournitures & conditions de nettoyage de sondes | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
|  <p>Tasse d'eau stérile ou d'eau propre du robinet</p> |  <p>Seringue</p> |  <p>Gaze</p> |  <p>Brosse* ou outil de nettoyage spécifique ENFit</p> |  <p>Cavité Capuchon Sonde d'alimentation ENFit</p> | |
| Remarque : Utiliser une brosse jetable ou suivre les instructions du fabricant en cas d'utilisation d'une brosse de nettoyage spécifique ENFit. | | | | | |
|  <p>1</p> |  <p>2</p> | |  <p>3</p> | | |
|  <p>4</p> | |  <p>5</p> | |  <p>6</p> | |
|  <p>7</p> | |  <p>8</p> | |  <p>9</p> | |
| <p>Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou porter des gants. Rincer la brosse avec de l'eau du robinet.</p> | | <p>Remplir la seringue avec de l'eau.</p> | | <p>Boucher l'orifice central du port de la sonde d'alimentation à l'aide des poils de la brosse. Rincer la cavité à l'eau avec force.</p> | |
| <p>Tourner la brosse au fond de la cavité.</p> | | <p>Rincer le capuchon avec de l'eau du robinet propre.</p> | | <p>Insérer les poils dans le capuchon de la sonde d'alimentation et tourner la brosse dans le capuchon pour nettoyer.</p> | |
| <p>Essuyer le port de la sonde d'alimentation et le capuchon avec de la gaze. Nettoyer les fournitures et laisser sécher à l'air.</p> | | <p>Rincer la cavité à l'eau avec force.</p> | | <p>Rincer le capuchon avec de l'eau du robinet propre.</p> | |

Répéter les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le capuchon et la sonde soient parfaitement propres.

* Une brosse à dents manuelle est réglementée en tant qu'un instrument médical destiné à éliminer les débris des dents dans certaines juridictions. Consulter votre prestataire de soins de santé qualifié ou le Gestionnaire de risques concernant l'utilisation recommandée pour le nettoyage des ports de la sonde d'alimentation. Éliminer les dispositifs à usage unique comme indiqué. Procédures de nettoyage avec la permission de Children's Mercy Kansas City.
© GEDSA 2018 ENFit est une marque déposée de GEDSA.