


ENFit® Procedimentos de limpeza

Tubos de alimentação com conectores macho ENFit

(por ex. tubos para gastrostomia endoscópica percutânea, orogástricos, transpilóricos e nasogástricos e outros dispositivos ENFit)


Conselhos para manter as portas do tubo de alimentação ENFit limpas. Realize a inspeção antes de ligar!

- **Preparação dos conjuntos de alimentação** - Interrompa a preparação antes do fluido chegar à extremidade do tubo.
- **Aspiração de seringa ENFit** - Limpe a medicação e nutrição da ponta/linhas exteriores e mantenha os fluidos fora do espaço morto antes de ligar ao tubo de alimentação.

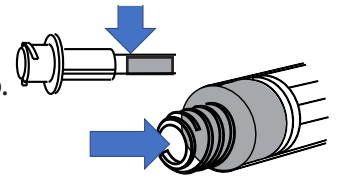

Para obtenção de melhor resultados, siga estas instruções para limpar os tubos pelo menos uma vez por dia ou sempre que existir material visível.

Termos e acessórios para limpeza de tubos

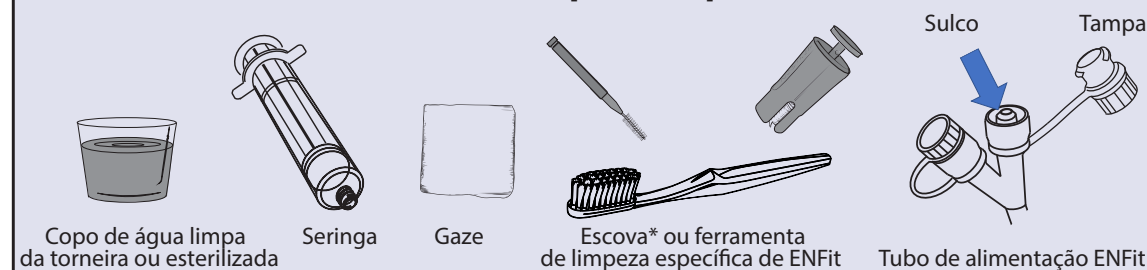

Copo de água limpa da torneira ou esterilizada


Seringa

Gaze


Escova* ou ferramenta de limpeza específica de ENFit

Tubo de alimentação ENFit


Nota: Utilize uma escova descartável ou siga as instruções do fabricante se estiver a utilizar uma escova de limpeza específica de ENFit.

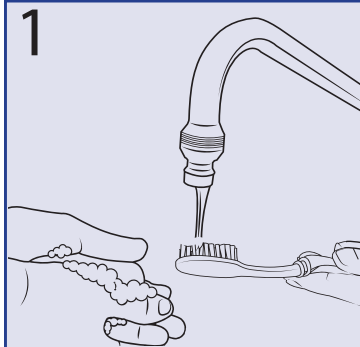


1 Lave as mãos com água e sabão ou use luvas. Enxagúe a escova com água da torneira.

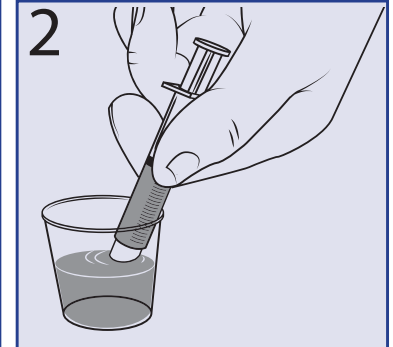


2 Encha a seringa com água.

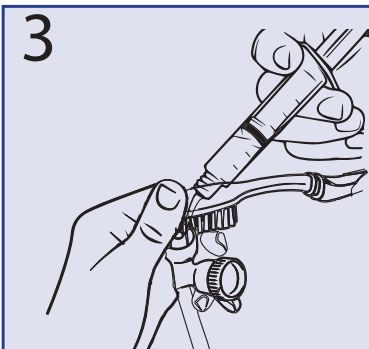


3 Tape o orifício central do tubo de alimentação com cerdas da escova. Encha o sulco à força com água.

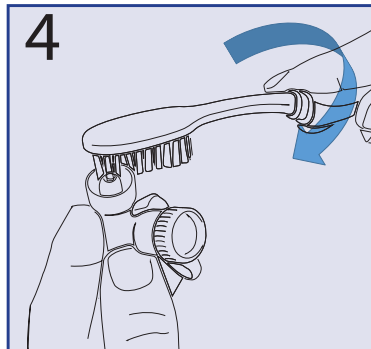


4 Rode a escova no fundo do sulco.

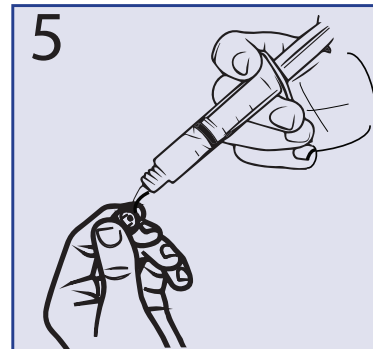

5 Enxagúe a tampa com água limpa da torneira.

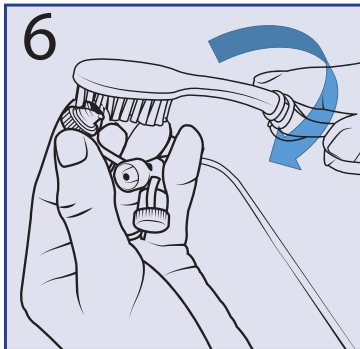

6 Introduza as cerdas na tampa do tubo de alimentação e rode a escova na tampa para limpar.

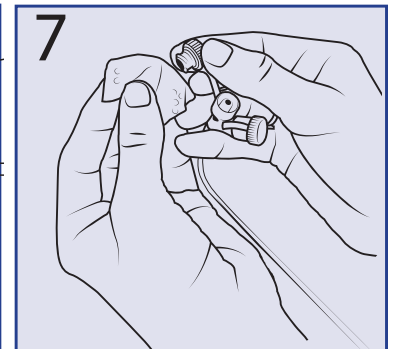

7 Limpe a tampa e a porta do tubo de alimentação com gaze. Limpe os acessórios e deixe-os secar ao ar.

Repita os passos 3 a 6 até a tampa e o tubo estarem bem limpos.

* Uma escova de dentes manual está regulamentada como dispositivo médico para remoção de resíduos dos dentes em algumas jurisdições. Consulte o seu prestador de cuidados de saúde licenciado ou Gestor de Risco relativamente ao uso recomendado para limpeza das portas do tubo de alimentação. Elimine os dispositivos descartáveis de acordo com as instruções. Procedimentos de limpeza cortesia do Children's Mercy Hospital de Kansas City.
© GEDSA 2018 ENFit é uma marca comercial registada da GEDSA.